



Comment poser la boucle de prélèvement BVD ?

- 1**

Préparer le kit et la pince spéciale

 - une paire de boucles
 - un capuchon
 - un sachet
 - une enveloppe T
- 2**

Insérer l'embout mâle sur la pince

Appuyer sur la targette grise et assurez vous que le trocart soit bien en place
- 3**

Insérer l'embout femelle sur la pince

Appuyer sur la pédale et glissez la pièce femelle à son emplacement
- 4**

Poser la boucle 2 en 1 sur l'oreille droite

Veillez à bien contenir le veau et à commencer par la boucle préleveuse
- 5**

Retirez la pince avec le trocart

Seul l'échantillon à envoyer reste sur la pince. Attention au prélèvement.
- 6**

Refermez le trocart avec son capuchon

Servez-vous de la pince pour cliquer correctement le capuchon protecteur
- 7**

Retirer le trocart de la pince

Ré-appuyer sur la targette pour libérer le trocart.
- 8**

Posez l'autre boucle

Changez de pince, poser la boucle puis libérer le veau.
- 9**

Mettez le trocart dans le sachet plastique

Utilisez un sachet par trocart et bien le refermer
- 10**

Mettez le sachet dans l'enveloppe

Mettez jusqu'à 3 trocarts par enveloppe si les vêlages sont groupés
- 11**

Notez précisément la date de prélèvement

Indiquer la date sur l'enveloppe et coller l'étiquette de l'adresse du laboratoire
- 12**

Postez l'enveloppe préaf-franchie

Ne dépassez pas 48 h pour l'envoi, avec conservation au réfrigérateur